

# S1

CE 0476



**ETHICAL IMPLANT SYSTEM**

Tempo di lettura 4 minuti

Un giorno  
senza sorriso  
è un giorno perso

(Charlie Chaplin)

Tutto quello da sapere  
sull'Implantologia dentale

# 10 buone ragioni per sorridere

- 1 Sorridere migliora il nostro umore.** L'atto del sorridere rilascia, oltre a Seratonina e analgesici naturali, le Endorfine, che sono gli ormoni del piacere: il sorriso è una medicina naturale!
- 2 Sorridere fa vivere più a lungo.** Come dimostrato da uno studio del 2010 di Abel & Kruger, le persone che presentano il sorriso di Duchenne vivono mediamente più a lungo di coloro che sorridono in modo non autentico (il sorriso di Duchenne è infatti l'indice del sorriso autentico che coinvolge sia le labbra che i muscoli intorno agli occhi) o non sorridono affatto.
- 3 Sorridere ci rende attraenti:** le persone sorridenti ci incuriosiscono. Il sorriso, infatti, è un fattore dell'attrazione: per questo vogliamo conoscere persone sorridenti e positive. Inoltre sorridere aiuta a fare una buona impressione agli occhi degli altri. Uno studio della Penn State University ha scoperto che quando si sorride non solo si appare più piacevoli e cortesi ma anche più competenti.



•**4 Sorridere è contagioso:** una persona sorridente trasmette energia positiva e serenità. Sorridi molto e avrai persone sorridenti intorno a te. Uno studio svedese dimostra che quando guardiamo una faccia felice non solo l'istinto ci spinge a mimarne l'espressione ma anche a provare l'emozione associata al sorriso: questo processo è il cosiddetto "contagio emotivo".

•**5 Sorridere aiuta il nostro sistema immunitario e abbassa la pressione sanguigna.** Il sorriso può davvero migliorare la salute: quando sorridiamo, le funzioni immunitarie del nostro corpo migliorano, probabilmente perché il corpo è più rilassato. Inoltre, sorridendo la nostra pressione sanguigna si riduce in maniera misurabile.


•**6 Sorridere ringiovanisce l'aspetto del nostro viso:** i muscoli che utilizziamo per sorridere, se esercitati, svolgono la stessa funzione di un lifting. Sorridi al lungo, sembrerai più giovane e ti sentirai meglio!

•**7 Sorridere aiuta a prevenire i segni dello stress sulla nostra pelle:** sorridere previene il nostro viso dal sembrare stanco e sciupato.

•**8 Sorridere è naturale:** diversi studi scientifici hanno dimostrato che gli umani iniziano a sorridere già da quando si trovano nell'utero materno. I neonati sorridono mentre dormono, i bambini circa 400 volte al giorno, mentre solo un terzo degli adulti più di venti.

•**9 Sorridere aiuta a essere felici.** Il semplice atto di sorridere manda al cervello il messaggio "tu sei felice". Inoltre, in tutte le culture il sorriso è associato alla felicità e alla soddisfazione nella vita.

•**10 Sorridere ci aiuta a essere positivi.** Prova questo test: Sorridi. Ora prova a pensare a qualcosa di negativo continuando a sorridere: non è facile vero? Quando sorridiamo il nostro corpo trasmette messaggi positivi, sorridere ci aiuta a stare lontani da depressione, stress e preoccupazioni!

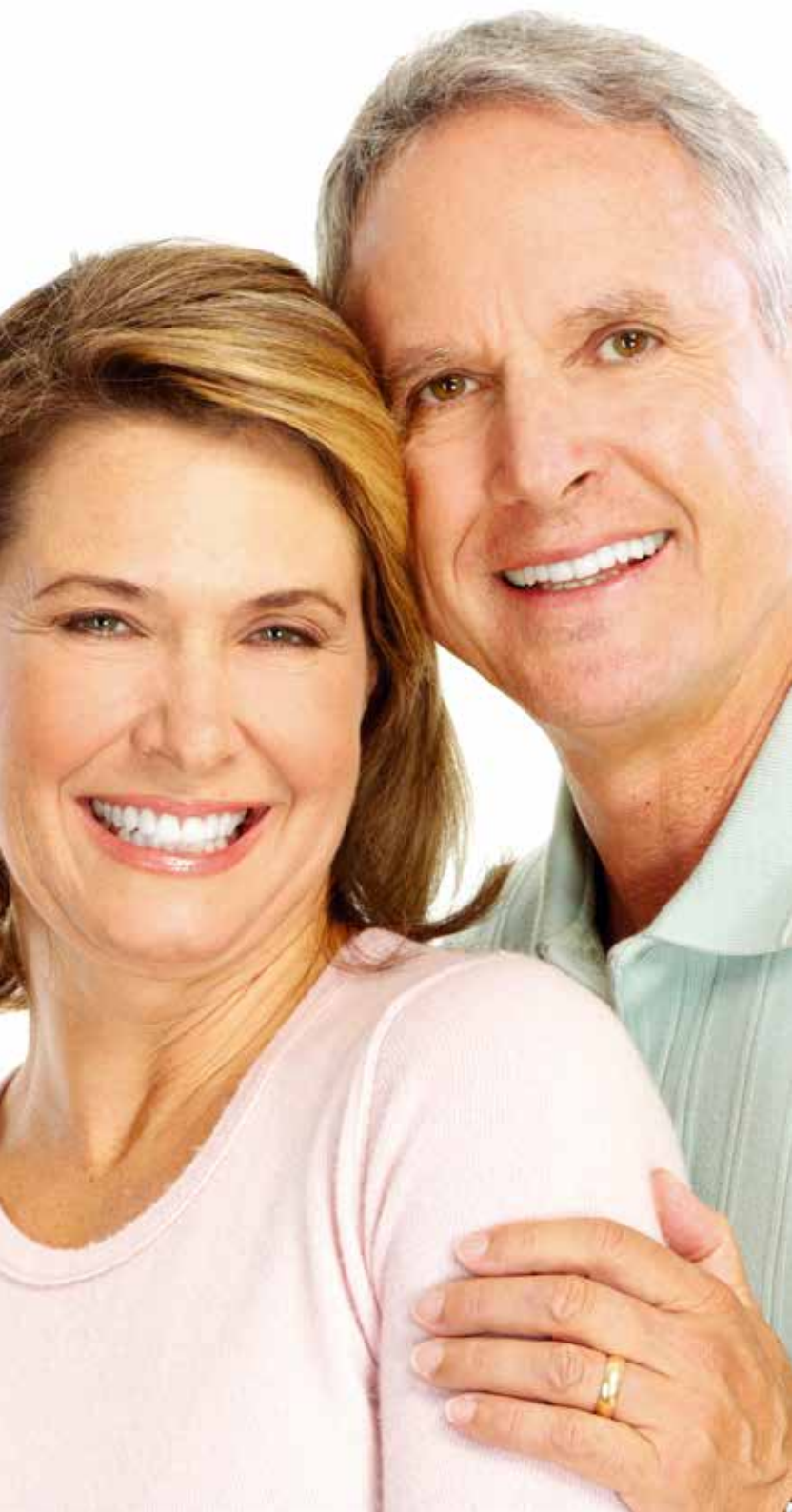

# Scegli la sicurezza e l'affidabilità degli impianti S<sup>1</sup>

## L'impianto dentale S1: che cosa è?

L'impianto dentale S1 rappresenta la più innovativa e affidabile tecnica per la sostituzione di denti mancanti o gravemente malati, quando sono incurabili. Si tratta di un dispositivo medicale simile a una vite di pochi millimetri, la cui lunghezza e diametro variano in base alle caratteristiche anatomiche del paziente, prima fra tutte la quantità di osso (mascellare o mandibolare) disponibile. La sua funzione è quella di sostituire in maniera artificiale le funzioni svolte dalla radice del dente naturale. Gli impianti S1 sono in titanio, le cui caratteristiche principali sono robustezza e biocompatibilità: è un materiale robusto, che permette all'impianto di durare per tutta la vita, e biocompatibile, ovvero capace di integrarsi in armonia con le cellule dell'osso e della gengiva in cui viene impiantato, attraverso un processo definito di "osteointegrazione". Inoltre, i casi di reazioni allergiche, di rigetto o di infiammazione dei tessuti provocati dal titanio sono molto rari.

## In quali casi si inserisce un impianto dentale S1?

L'impianto S1 è la soluzione alla mancanza:

- Di uno o più denti adiacenti (edentulia parziale). Rispetto a altre soluzioni, come ad esempio l'inserimento di un ponte per sopperire alla mancanza di un dente, l'impianto S1 rende possibile l'inserimento di uno o più denti artificiali perfettamente simili a quelli naturali senza sacrificare i denti sani adiacenti.

- Dell'intera arcata dentale, superiore o inferiore (edentulia totale). Rispetto alle protesi mobili tradizionali, che solitamente si mantengono in posizione attraverso fastidiosi adesivi, le protesi su impianti (solitamente ne bastano solo quattro per un'intera arcata – Tecnica di Malo) restano stabili, anche durante la masticazione.





# Come avviene l'inserimento di un impianto S1?

## **Fase1: pianificazione dell'intervento**

L'inserimento di un impianto viene preceduto da un'accurata fase di pianificazione dell'intervento, durante la quale il medico analizza in maniera approfondita le caratteristiche dell'osso ricevente e definisce posizionamento e dimensioni dell'impianto che verrà inserito.

## **Fase2: inserimento dell'impianto**

L'inserimento di un impianto S1 avviene attraverso un intervento semplice, indolore e di breve durata. Eseguita l'anestesia locale, l'impianto, a seconda dei casi, può essere inserito incidendo la gengiva nel punto in cui verrà inserito o senza tagliare la mucosa gengivale. L'impianto viene quindi avvitato con cautela nell'osso. A questo punto la gengiva viene richiusa e solitamente viene applicata una protesi provvisoria, che può essere fissa o mobile.

## **Fase3: la guarigione**

I tempi di guarigione necessari all'osso per guarire e crescere intorno all'impianto (realizzando quindi il processo di osteointegrazione) variano dai 2 ai 6 mesi. Una volta che l'osso è guarito, si procede all'inserimento nell'impianto di un moncone, descrivibile come un pilastro in titanio della dimensione di pochi millimetri, che rappresenta la base intorno alla quale viene ricostruito il manufatto protesico del tutto simile a un dente naturale.

Vi sono dei casi in cui queste fasi possono avvenire in un unico momento. Spetta al medico valutare di caso in caso la soluzione migliore.

# Cosa dovrò affrontare e cosa proverò?

## **È un intervento doloroso?**

No. L'intervento si svolge sotto anestesia locale. Il paziente non avverte alcun dolore.

## **Ci sono effetti post-operatori?**

Generalmente nei giorni seguenti l'intervento il paziente prova un leggero fastidio, simile a quello che si prova in seguito all'estrazione di un dente. Un analgesico è solitamente sufficiente per controllare l'eventuale insorgenza di dolore post-operatorio.





## Ci sono delle controindicazioni?

L'impianto dentale S1 può essere integrato nell'osso di qualsiasi paziente, qualora le condizioni di salute generale del paziente siano buone. Non vi sono limitazioni d'età nei pazienti adulti; al contrario, l'inserimento di un impianto è controindicato nei pazienti giovani nei quali la maturazione scheletrica non si sia ancora del tutto conclusa.

Il rischio di infezione è molto più alto nei pazienti con una scarsa igiene orale.

Il processo di osteointegrazione risulta essere molto più lento nei pazienti fumatori.

## L'intervento è costoso?

### Per quanto tempo dura un impianto S1?

I costi del trattamento implantare variano di caso in caso, in base alla complessità dello stesso. Bisogna comunque considerare che una volta integratosi nell'osso, se il paziente mantiene una buona igiene dentale e si sottopone a controlli periodici presso il proprio dentista di fiducia, l'impianto S1 dura tutta la vita. Gli impianti dentali S1 consentono non solo il recupero funzionale e masticatorio dei denti ma anche un perfezionamento estetico molto soddisfacente: **gli impianti S1 sono un investimento per la tua salute!**

## Posso avere una garanzia di riconoscibilità dell'impianto S1?

Certo. A intervento concluso il medico implantologo rilascia un passaporto implantare che contiene tutte le informazioni necessarie sul tuo impianto S1, costituendone una garanzia di qualità. In caso di necessità, esibendo questo passaporto, qualsiasi medico dentista, anche straniero, sarà in grado di intervenire adeguatamente sul problema.



# S1: una scelta sicura e semplice

**Il progetto S1 nasce dalla volontà di rendere l'implantologia una pratica semplificata, minimamente invasiva e dai risultati certi. In sole due parole, sicura e semplice, Safe&Simple. È il risultato dell'esperienza di più di 15 anni di studi e di casistica documentata e della collaborazione e cooperazione tra il mondo della ricerca universitaria, delle aziende private e dei professionisti.**

## Proponiamo un'implantologia

**Etica:** Safe&Simple si ispira al principio di rispetto del paziente, del medico dentista e dell'odontotecnico. Proponiamo un sistema di implantologia virtuoso che è responsabile e basato su relazioni umane genuine e moralmente corrette. Il nostro impegno è quello di rendere l'implantologia accessibile a tutti sia dal punto di vista delle soluzioni protesiche offerte sia dell'impegno economico richiesto al paziente.

**Innovativa:** Safe&Simple considera i temi della ricerca, dello sviluppo e della formazione elementi essenziali, allo scopo di offrire ai nostri pazienti soluzioni innovative, tecnologicamente avanzate e di assoluta efficacia. Inoltre, propone moltissimi corsi di formazione e approfondimento in Italia e all'estero rivolti non solo ai medici dentisti ma anche ai tecnici odontotecnici che lavorano nel tuo studio di fiducia.

**Di qualità:** Safe&Simple da sempre è protesa alla massima qualità dei prodotti offerti. Gli impianti S1 sono garantiti in tutte le loro parti e sono prodotti in stretto regime di qualità secondo le norme:



- UNI EN ISO 9001:2008
- UNI CEI EN 13485:2012
- CE n. 0476

# S1

La soluzione per  
continuare a sorridere



S1

è un prodotto:



**Safe&Simple<sup>®</sup> s.r.l.**

**Sistemi Etici** di implantologia dentale ● ○ ●

Corte del Medà, 27/B

31053 Pieve di Soligo TV - ITALY

tel. +39 0438 837231 – fax +39 0438 842426

[www.safeandsimple.net](http://www.safeandsimple.net) - [info@safeandsimple.it](mailto:info@safeandsimple.it)

seguici su Facebook

